

Gebrauchsinformation **Aktimed® WRAP⁺**

Aktimed® WRAP⁺ ist ein feuchter, kühlender, halbstarrer Stütz- und Entlastungsverband aus der Gruppe der Zinkleimverbände. Die Rezeptur enthält u.a. ein Hydrokolloidgel, in das ein Pflanzenextrakt aus Arnika montana, Rhus toxicodendron und Ruta graveolens eingelagert ist. Die physikalischen / mechanischen Hauptwirkungen des Verbandes werden durch das pflanzliche Extrakt unterstützt. Die Rezeptur ist frei von Fetten wie z. B. Vaseline, Paraffine und hypoallergen sowie latexfrei.

Indikationen:

Aktimed® WRAP⁺ wird in der Traumatologie, Orthopädie und Sportmedizin bei Verletzungen des Muskels, Sehnen und Bandapparates sowie bei Sportverletzungen eingesetzt, z. B.:

- Luxationen, Kontusionen, Distorsionen, Muskelfaserrisse, Tendopathien, Tendovaginitiden
- Behandlung von Ödemen nach Weichteilverletzung der Extremitäten
- Bandläsionen, Zerrungen, Achillodynien
- Abbau posttraumatischer Ödeme
- Nachbehandlung von Frakturen und Luxationen nach Gipsruhigstellung

Der Verband darf bei offenen Wunden nur in Kombination mit und über einer sterilen Wundauflage verwendet werden.

Anwendungshinweise:

Offene Wunden / Hautareale müssen zuerst mit einer sterilen Wundauflage abgedeckt werden.

Aktimed® WRAP⁺ sollte mit leichtem Zug angelegt werden. Bei 3 bis 4 Lagen übereinander hält die angenehm kühlende Wirkung mehrere Stunden an. Ein Trikotschlauch / eine kohäsive Binde über dem Verband schützen vor Verschmutzung der Kleidung. Durch Kühlung, Feuchtigkeit und Kompression hilft der Verband bei Abschwellung und Schmerzlinderung. Der Verband trocknet innerhalb von ca. 4 bis 5 Stunden aus, bildet dann eine stabile, komprimierende Schale und kann bis zu 6 Tagen angelegt bleiben.

Sicherheitshinweise:

Nicht auf offenen Wunden / Hautarealen verwenden.

Nicht bei peripheren arteriellen Verschlusskrankheiten, Venenentzündungen (septische Phlebitis), tiefen Beinvenenthrombosen (Phlegmasia coerulea dolens), bei Herzinsuffizienz, über superfiziellen Wunden oder bei Diabetes anwenden.

Bei Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe (z.B. Phenoxyethanol) nicht verwenden.

Bei Auftreten von Juckreiz, anhaltender Hautrötung oder Blasenbildung sollte die Behandlung unterbrochen und der behandelnde Arzt konsultiert werden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Lagerungshinweise:

Aktimed® WRAP⁺ sollte bei Temperaturen bis max. 35° C gelagert werden. Bei Lagerung an einem kühlen Ort kann die kühlende Wirkung des Verbandes verbessert werden.

Aktimed® WRAP⁺ sollte liegend gelagert werden.

Zusammensetzung:

Gewebe: Zellwolle, Polyamid

Rezeptur: Zinkoxid, Wasser, Glycerin, Hydrokolloidgel mit Extrakt aus Arnika montana (Verdünnungsstufe 10⁻⁶), Rhus toxicodendron (Verdünnungsstufe 10⁻⁸) und Ruta graveolens (Verdünnungsstufe 10⁻⁶), Phenoxyethanol, Dextrin

Sortimentsübersicht:

AW 20122 10er Pack (8 cm x 5 m)

CE: Konform gemäß EU Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte
Produktion: Deutschland

Stand 08/2017

Aktimed GmbH, Theaterstrasse 18, 69117 Heidelberg